

El sistema de pistola de lavado se emplea para la limpieza de heridas. Combina la comodidad y el poder de un flujo suave, eficiente para la limpieza e irrigación pulsátil. Empleado en ortopedia. Puede ser utilizado para el reemplazo de cadera y rodilla, traumatismos, limpieza de heridas, etc.

Este pack incluye una cánula de limpieza de alta capacidad de pulverización y una cánula estrecha de alta capacidad intra modular. Diseñado para un solo uso.

2: Estructura Principal y Esquema Eléctrico

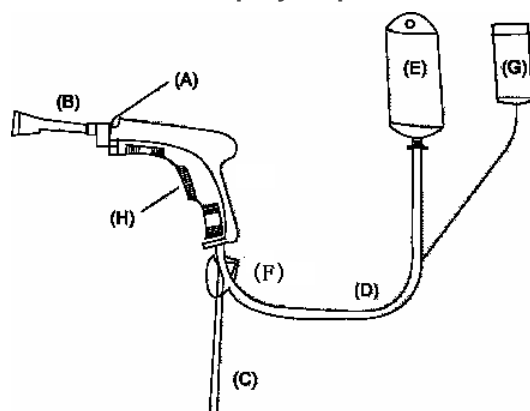


Figura 1: Estructura Principal

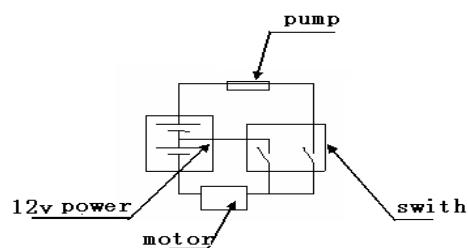


Figura 2: Esquema Eléctrico

3: INFORMACION IMPORTANTE PARA USUARIO

3.1 Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en estas instrucciones o en el propio producto

Símbolo	Descripción
WARNING!	Indica una condición que si no se sigue exactamente puede causar daño al paciente o usuario. No continúe hasta que se entiendan las instrucciones y todas las condiciones establecidas se cumplan.
CAUTION!	Indica una condición que si no se sigue exactamente puede causar daños al producto o equipamiento. No continúe hasta que se entiendan las instrucciones.
NOTE!	Proporciona importante información para un uso óptimo del producto.
	Un solo uso.
	¡Atención!, Consulte los documentos adjuntos.
	Tipo BF
	FABRICANTE
	Esteril EO

3.2 Lea atentamente estas instrucciones antes de usar y tenga en cuenta lo siguiente

¡ADVERTENCIAS GENERALES!

- Esteril si el paquete está sin abrir y en buen estado.
- Peligro de explosión.
- No utilizar en presencia de anestésicos o gases inflamables.
- No sumerja el mango en líquido, puede comprometer la eficacia de la bomba o modificar el PH del líquido.

¡PRECAUCION!

Este dispositivo sólo puede ser vendido bajo orden del médico.

NOTA:

- 1: Desechable.
- 2: Almacenar en lugar fresco y seco
- 3: Contenido : 1 Pieza
- 4: Si se almacena durante más de un año, se recomienda revisar la batería.

4: FUNCIONAMIENTO (Consultar Figura 1)

- 1: Abrir el paquete y extraer todos los elementos.
- 2: Retirar el bloqueo de anilla presionando hacia arriba (A)
- 3: Fije la cánula de limpieza para manejar la pistola. Empuje hasta que la conexión sea segura (B)
- 4: Seguro de la cánula de limpieza por el anillo de cierre. Retirar el bloqueo de anilla para desmontar la cánula. (A)
- 5: Instale la batería en un lugar conveniente (G)
- 6: Conecte la línea de riego a la fuente de riego (D – E)
- 7: Conecte la línea de aspiración a la fuente de succión carrer (C)
- 8: Retire el protector del gatillo. Presione la parte superior de la palanca de disparo (H) para aplicar a alta velocidad. Presione el gatillo de la palanca para aplicar líquido a baja velocidad. En el centro de la palanca no hay aplicación de fluido.
- 9: Para limitar la succión, el dispositivo dispone de una pinza en la adaptación de la línea de aspiración a la pistola de mano (F)

5: USO UNICO

Deseche el sellado y la jeringa sellada de acuerdo a los protocolos del hospital.

6: INFORMACION TECNICA

Peso	210g
Velocidad lenta de flujo	600 ml/min
Alta velocidad de flujo	1.000 ml/min
Desarrollado por	8x1.5 cell